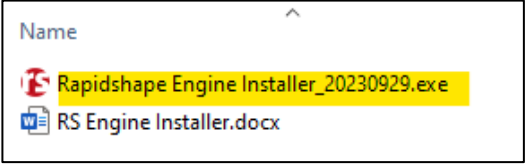
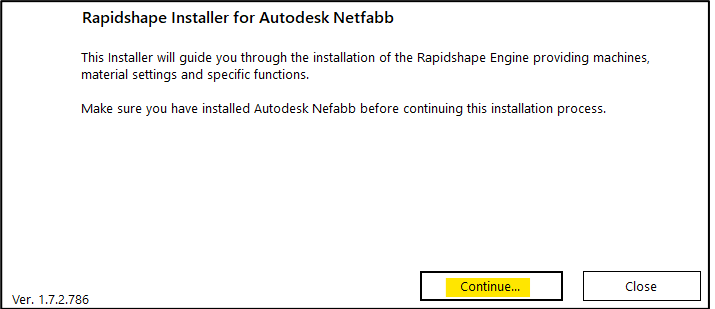
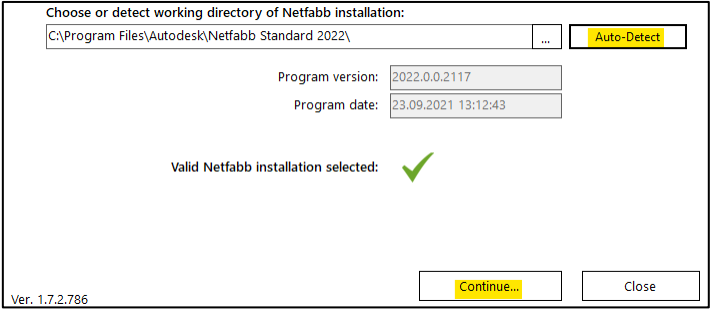


# Aktualisieren der Netfabb-Materialbibliothek mit dem RS Engine Installer

<p>0. Um die aktuellste Materialbibliothek für Ihr SHERAprint 3D-Druck-System zu erhalten, benötigen Sie die aktuellste Engine (Datenbank)</p>	
<p>1. In der .zip Datei, die Sie soeben heruntergeladen haben, befindet sich eine .exe Datei namens Rapidshape Engine Installer</p>	
<p>2. Um die Installation zu beginnen, schließen Sie Netfabb und doppelklicken Sie auf die .exe Datei</p>	<p><i>Möglicherweise werden Sie von Windows darauf hingewiesen, dass Sie eine potentiell gefährliche Anwendung ausführen möchten. Diese Warnung dürfen Sie quittieren und die Anwendung starten.</i></p>
<p>3. Drücken Sie im Startbildschirm „Continue“</p>	
<p>4. Klicken Sie auf „Auto-Detect“, es sollte Ihre aktuell verwendete Netfabb Version gefunden werden (meist Netfabb 2022)</p> <p>Bestätigen Sie mit „Continue“</p>	

5. Es wird die aktuell verwendete Version („You have“) und die neue Version („You get“) angezeigt.

Mit „Continue“ bestätigen

A Netfabb installation was detected successfully. Please check the information below to proceed:

	You have	You get
Engine date:	18.07.2023 11:04:12	20.09.2023 17:26:10
Engine version:	2021.0.2054.778	2021.0.2054.786

[Release Notes](#)

Select your country: Germany

Autodesk login already available and license pre-registered.  
Use Autodesk login (not required)? No

Ver. 1.7.2.786

Back... Continue... Close

6. Unter „additional features“ die Checkbox „NetfabbPrint“ anhaken und mit „Install“ die Installation durchführen.

Select additional features:

☒ NetfabbPrint - Shell execution for Netfabb

☐ 3Shape Produce Integration

Call Rapidshape Engine for Netfabb via NetfabbPrint.exe from the command line to load STL files or archives (e.g. RShapeSTL) and execute a suitable workflow.

Use this feature to establish interfaces from other CAD/CAM applications (e.g. exoprint).

Ver. 1.7.2.786

Back... Install... Close

7. Wenn die Installation erfolgreich war („Installation successful!“) kann Netfabb wieder gestartet werden

```

24.11.2023 12:48:13 - ..... 'rapidshape.netfabbengine' copied to 'C:\Users\auer.SHERA\AppData\Roaming\Netfabb\rapid
24.11.2023 12:48:13 - ..... 'workspaces.xml' copied to 'C:\Users\auer.SHERA\AppData\Roaming\Netfabb\rapidshape eng
24.11.2023 12:48:13 - ... Backup finished
24.11.2023 12:48:13 - ... Installing Engine package...
24.11.2023 12:48:13 - ..... Copy 'rapidshape.netfabbengine' and 'workspaces.xml' ...
24.11.2023 12:48:13 - ..... Installing feature 'NetfabbPrint - Shell execution for Netfabb' ...
24.11.2023 12:48:13 - ..... Copied to 'C:\ProgramData\Rapidshape\NetfabbPrint'
24.11.2023 12:48:13 - ..... Added file 'printrequest_to_netfabbprint.bat'
24.11.2023 12:48:14 - ..... Validating installation for S-1-5-21-1420774829-969474738-973961551-4617...
24.11.2023 12:48:14 - ..... Registering engine for Germany...
24.11.2023 12:48:14 - ..... Setting Autodesk licensing option "Not using Autodesk login"...
24.11.2023 12:48:14 - ... Engine installed
24.11.2023 12:48:14 - ... Installation files deleted
24.11.2023 12:48:14 - Installation successful
  
```

Ver. 1.7.2.786

Back... Start Netfabb Close

8. Neue Materialien können nun in der Materialbibliothek angelegt werden!